


Celleprøvetaking livmorhals



Metode: Thinprep

- Unngå eksplorasjonskrem, om nødvendig bruk vannbasert
- Ikke ta prøve ved menstruasjon
- Stopp prøvetaking ved blødning
- Sjekk holdbarhetsdato på prøvebeholder

Prøven skal tas i overgangen mellom plate- og sylinderepitel

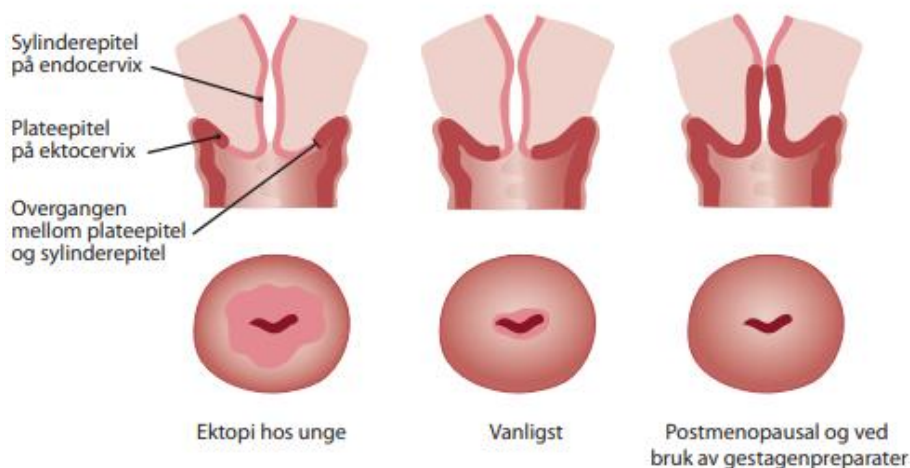

(Illustrasjon: Jeanette Engqvist / Illumedic)



Brush

- Dreies 5x 360° med klokken



Brush Combi

- Dreies 2x 360° med klokken
- Egnet for postmenopausale
- Brukes ikke på gravide

Etter prøvetaking:

- Skyll børsten umiddelbart
- Roter børsten 10x samtidig som den presses mot bunnen av prøvebeholder
- Visp så børsten kraftig for å frigjøre ytterligere cellemateriale
- LA ALDRI BØRSTEN STÅ I VÆSKEN før cellene er ristet løs fra børsten
- Kast børsten rett etter bruk