


# Celleprøvetaking livmorhals



## Metode: Surepath

- Ikke ta prøve ved menstruasjon
- Stopp prøvetaking ved blødning
- Sjekk holdbarhetsdato på prøvebeholder

Prøven skal tas i overgangen mellom plate- og sylinderepitel

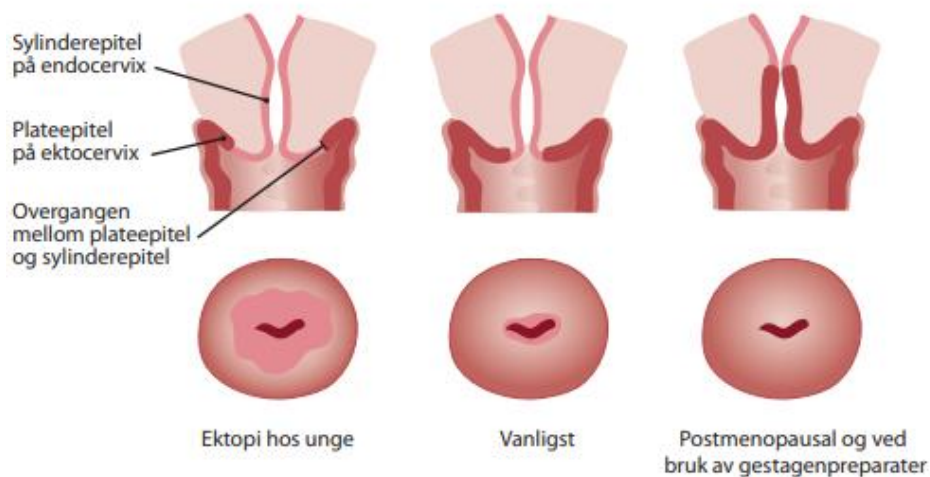

(Illustrasjon: Jeanette Engqvist / Illumedic)



## Brush

- Dreies 5x 360° med klokken



## Brush Combi

- Dreies 2x 360° med klokken
- Egnet for postmenopausale
- Brukes ikke på gravide

## Etter prøvetaking:

- Knekk av børstehodet i prøvebeholder
- La børstehodet bli liggende i prøvebeholder